




Маска для взрослых/детей пластмассовая многоразовая


(Принадлежность к ингаляционному прибору
PARI Compact и/или составная часть прибора
ингаляционного PARI без подогрева)

№ РЗН 2016/3978

№ РЗН 2017/5987

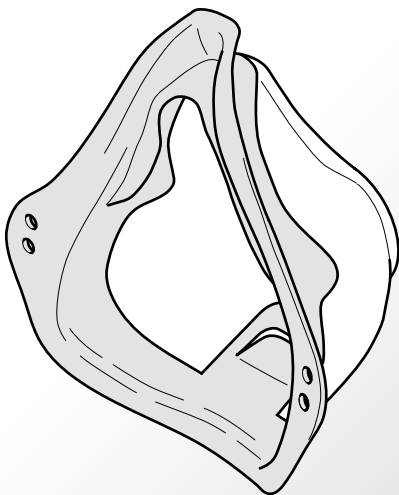

CE 0123

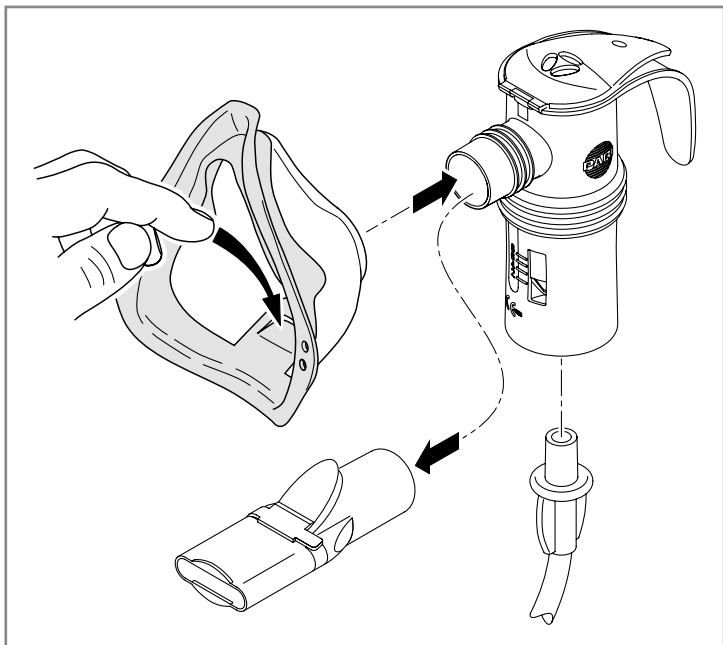

Инструкция по эксплуатации

Маски являются составной частью и/или принадлежностью ко всем небулайзерам (распылителям) PARI. Они могут использоваться при проведении ингаляционного лечения верхних и нижних дыхательных путей если нет возможности использовать мундштук или пациент отдает предпочтение ингаляции через маску. Детские маски предназначены для детей до 4 лет.

i

- Ингаляция через мундштук более эффективна для лечения нижних дыхательных путей, поскольку при этом большее количество медикамента попадает в легкие.
- Строго следуйте рекомендациям по сборке, проведению ингаляции, очистке масок указанным в инструкции к небулайзеру.
- Эластичная лента не подлежит дезинфекции или стерилизации, ее можно только мыть.
- Перед каждым использованием маски необходимо убедиться, что клапан вдоха, закрепленный на маске расположен снаружи. При необходимости протолкните его легким надавливанием изнутри.
- Термическая дезинфекция и стерилизация масок возможны лишь с использованием специального стабилизатора, который заказывается отдельно.

Материалы медицинского изделия:

Полипропилен, термопластический эластомер.

Технические характеристики:

Маска для детей пластмассовая многоразовая

С клапаном выдоха и мягким уплотнителем для более плотного прилегания маски к лицу. Внутренний Ø отверстия совмещения с небулайзером: 22 мм
Макс. габаритные размеры: 8,5x10,0x4,5 см

Маска для взрослых пластмассовая многоразовая

С клапаном выдоха и мягким уплотнителем для более плотного прилегания маски к лицу. Внутренний Ø отверстия совмещения с небулайзером: 22 мм
Макс. габаритные размеры: 9,5x11,5x5,0 см

Специалисты по эффективной ингаляции



 PARI GmbH
Moosstrasse 3
82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (0)8151-279 0
Fax: +49 (0)8151-279 101
E-Mail: info@pari.de
www.pari.com/de

Уполномоченный
представитель в РФ: ООО
«ПАРИ синергия в медицине»
117418 г.Москва, а/я 16,
тел/факс: +7 (495) 718-75-91
sales@parinebuliser.ru
www.pari.com.ru